

日医オリジナル

デジタルオーディオメータ

最新のJIS規格に適合!
安全規格 JIS T 0601-1:2017

2018年モデル新登場!



日医オーディオメータの特長



5年間の無償修理

万が一の時にも安心です。

小型スピーカー内蔵



本体に内蔵されたスピーカーより「ピー」という検査音を出すことができます。検査音をスピーカーの音で事前に生徒児童へ聴かせることによりスムーズな検査ができます。

保管ケース標準装備



1～2人用



5人用

1人用2人用は軽くて持ちやすいビニールケース、5人用は金属ケースが標準装備されています。

保管や持ち運びにとっても便利です。

2種類の検査音


連続音

ぴー



断続音

ぴ・ぴ・ぴ

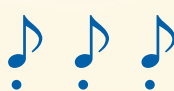

「連続音」と「断続音」2種類の検査音が選択できます。

2種類の検査方法



「インタラプタ」ボタンを押すと①検査音が鳴る②検査音が止まるの2つの方法が選択できます。慣れ親しんだ方法で検査ができます。

かんたん選別選択ボタン

「かんたん選別選択」ボタンで健康診断マニュアルに基づく検査が簡単にできます。
●1000Hz/30db ●4000Hz/25db

初期設定は検査モード

電源を入れた時は「かんたん選別選択」で初期設定されていますので、直ぐに検査を始めることができます。

見られない工夫

「ふた」が手許の操作の「目隠し」になります。

使用方法

検査をする前に ++++++

イヤホンを本体背面に接続してください。(本体とイヤホンの番号が合うように接続してください。)


パネルカバーを開き、電源スイッチをONにしてください。

液晶ランプが点灯するのを確認してください。

さあ、検査をはじめましょう! ++++++



右耳に赤色、左耳に青色のイヤホンを着用してください。

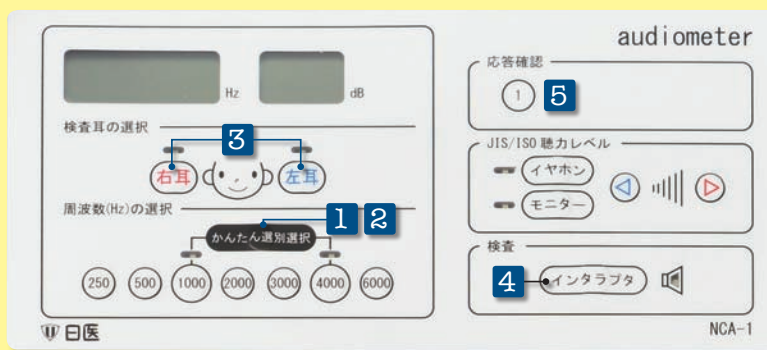

児童生徒等の健康診断マニュアルに基づく検査方法

1

かんたん選別選択

ボタンを押します。
※電源を入れた時は、「かんたん選別選択」で初期設定されています。

2

周波数ボタン(1000)または(4000)を押します。
1000Hz 30dB } が自動設定されてい
4000Hz 25dB } ます。

3

イヤホン選択ボタン(右耳)(左耳)を押して、左右を選択します。

4

インタラプタ ボタンを押して、検査音を出します。

5

応答確認ランプが点灯するのを確認してください。

商品の説明を動画でも見ることができます!



移動に便利なケース付!



ソフトケース
(1人/2人用)

キャリングケース
(5人用)

デジタルオーディオメータ

※「JQA検定」とは「JQAによる検査(校正)」を意味します。

日医オリジナル 管理医療

コード	品番	仕様	価 格
日医 - 77882	NCA-1 (1人用)	ソフトケース付	¥103,000 (税別)
日医 - 77883	NCA-1 (1人用)	*JQA検定合格証付き・ソフトケース付	¥121,000 (税別)
日医 - 77884	NCA-2 (2人用)	ソフトケース付	¥126,000 (税別)
日医 - 77885	NCA-2 (2人用)	*JQA検定合格証付き・ソフトケース付	¥153,000 (税別)
日医 - 77886	NCA-5 (5人用)	専用キャリングケース付	¥196,000 (税別)
日医 - 77887	NCA-5 (5人用)	*JQA検定合格証付き・専用キャリングケース付	¥232,000 (税別)
日医 - 77881	オーディオメータ5年間無償修理オプション		¥3,000 (税別)

日医のオーディオメータは、製造元での出荷時に1台ずつ JIS規格に基づく検査を実施しております。
指定管理医療機器 製造販売認証番号: 223AABZX00005000

5年間保証について...お客様の正常なご使用状態においての故障が対象となります。以下については保証修理の対象外となります。①校正点検費用 ②誤った取扱い、不当な修理や改造による故障および損傷 ③落下や衝撃など不可抗力による故障および損傷 ④火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧及びその他の天災・地変による故障、不具合等 ⑤継続使用が可能と判断される液晶交換

仕様	77882 / 77883 (検定付)	77884 / 77885 (検定付)	77886 / 77887 (検定付)
型番	NCA-1	NCA-2	NCA-5
基準等価閾値レベル	250Hz/27dB・500Hz/13.5dB・1000Hz/7.5dB・2000Hz/9dB・3000Hz/11.5dB・4000Hz/12dB・6000Hz/16dB		
検査周波数	選別聴力検査 1000Hz・4000Hz 気導聴力検査 250Hz・500Hz・1000Hz・2000Hz・3000Hz・4000Hz・6000Hz		
周波数誤差	±2%		
レベル測定範囲	選別聴力検査 1000Hz / 30dB・4000Hz / 25dB 気導聴力検査 -10 ~ 70dB 5dBステップ		
電源	最大電源電圧 AC120V 50 / 60Hz 動作電源電圧 AC90 ~ 110V 50 / 60Hz		
動作温度・湿度範囲	15 ~ 35℃・30 ~ 80%		
保存温度・湿度範囲	-10 ~ 60℃・10 ~ 80%		
外形寸法	W290×D205×H60mm		
重量	2.3kg	2.5kg	3.1kg
イヤホン数	1×2 (両耳)	2×2 (両耳)	5×2 (両耳)

JIS T 1201-1:2011(タイプ4)適用品 EMC規格 JIS T 0601-1-2:2012適用品
安全規格 JIS T 0601-1:2017適用品

株式会社 日本医療器研究所

〒113-0034 東京都文京区湯島2丁目24番11号
TEL.03(3834)3191(代表) FAX.03(3831)8964
URL. <http://www.nihon-iryouki.jp>

保健の日医

検 索